

## VAROITUKSET JA VAROTOIMET

### 1. TUOTE

SBI Walker-ortoosit ovat lääkinällisiä laitteita ja ne ovat suunniteltu uusinta tekniikkaa käyttäen. Lisäksi ne ovat tarkastettu ja ne täyttävät direktiivin 93/42/ETY soveltuvat vaatimukset. Tästä huolimatta on tärkeää huomioida, että niiden mahdollisesti aikaansaamien vaarojen aliarviointi voi aiheuttaa tapaturmia tai vahinkoja. Ennen SBI-ortoosien käyttöä lue huolellisesti seuraavien ohjeiden kaikki osat. Oikein tapahtuva käyttö on erittäin tärkeää, jotta laite toimii tehokkaasti. Tarkasta usein, onko iholla havaittavissa kuumotusta tai ärsytystä. Jos havaitaan ihomuutoksia tai tunnetaan kipua, säädä uudelleen tarranauhalla toimiva kiinnitysjärjestelmä. Älä käytä laitteita, jos on havaittavissa tunnottomuutta anestesian jälkeen. Suojaa aina jalkaterä ja sääri asianmukaisella sukalla, joka kuuluu SBI:n toimitukseen (**SBi Protective Sock**). Ole erityisen varovainen, kun kävellään liukkailla tai kosteilla pinnoilla. Älä koskaan kävele ilman tukijalkineen pohjaa.

### OIKEAA KÄYTTÖÄ VARTEN

- Tuotetta saa myydä ja käyttää ainoastaan lääkärin määräyksestä tai terveydenhuollon ammattihenkilön ohjauksessa.

Monikerroksisia **SBi KIT 3\*3** -tukipohjallisia (**SBi Motus**- ja **SBi W-Heel** -sarjan varusteena), yksilohkoista tukipohjallista (**SBi Frame** -sarjan varusteena) tai **SBi PLTM** -tukipohjallista saa käsitellä ainoastaan erikoistunut henkilöstö (lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö).

- Noudata puhdistusta ja säilytystä koskevia ohjeita;
- VAURIOITUMATTOMASSA jalassa suositellaan käyttämään suojakenkää, jonka pohjan korkeus on vähintään 3 cm (kuten YDA Optima Molliter -kengät, www.molliter.com);
- ole erityisen varovainen käveltäessä nesteiden tai liukkaiden pintojen läheisyydessä;
- vältä toimenpiteitä, jotka tekevät tuotteesta työkalun tai lelun;
- älä aja moottoriajoneuvoja, kun käytät SBI-tuotteita;
- älä vie tuotetta avotulen tai lämmönlähteiden läheisyyteen;
- varmista, että kaikki kiinnityslaitteet ovat suljettu kunnolla ennen käyttöä ja kävelyä;
- varmista, että pohja on kiinnitetty kunnolla ennen käyttöä ja kävelyä;

### 2. KÄYTTÖTARKOITUS



#### 2.1 TERAPEUTTISET KÄYTTÖALUEET

**SBi Motus:** Diabeettisen plantaarisen haavauman/haavan kevennys, jalkaterän etu- ja keskiosan plantaarisen haavauman/haavan kevennys.

**SBi Frame:** Jalan vakauttaminen, nilkkamurtuma, vakavat nilkan venähdykset, jalkapöydän murtuma, leikkauksen jälkeinen kevennys.

**SBi W-Heel:** Kantapään haavauman/haavan hallinta.

#### 2.2 RAJOITUKSET

Tuotteen käytössä on huomioitava rajoitukset, jotka aiheutuvat erityisestä käytöstä tai käytettyjen materiaalien ominaisuuksista. Laitteen rakenteellisten muutosten tapauksessa tai jos kävelyyn aiheutuu negatiivisia vaikutuksia tai muutoksia, keskeytä laitteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

### 3. VASTUUN RAJOITUKSET

#### 3.1 YLEISTÄ

Tuotanto vastaa nykytason vaatimuksia ja se pohjautuu tällä hetkellä tunnetuihin teknistieteellisen tutkimuksen tuloksiin. Yhtiö Salvatelli s.r.l. ei ota mitään vastuuta tuotteen käytöstä, jos sitä käytetään seuraavassa luetelluissa sopimattoman käytön olosuhteissa.

#### 3.2 SOPIMATON KÄYTTÖ

Sopimattomalla käytöllä tarkoitetaan tuotteen käyttöä seuraavissa olosuhteissa:

- terapeuttisten käyttöaiheiden noudattamatta jättäminen
- valmistajan määräysten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen
- voimassa olevien turvallisuusmääräysten vastainen käyttö tai niiden noudattamatta jättäminen
- huomattavat mittojen muutokset
- huomattava rakenteellinen muutos, joka sisältää osien muutoksen tai lisäyksen
- tuotteen muokkaaminen muuttamalla sen muotoa huomattavasti

- myös vähäinen urheilukäyttö
- puhdistus sopimattomilla tuotteilla
- sopimaton säilytys
- tuotteen väärinkäyttö
- moottoriajoneuvojen ajo SBI-tuotteiden käytön aikana
- laitteen osien asennus tai purku ammattitaidottoman henkilöstön toimesta
- asennusta tai purkua koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen
- kävely ilman SBI:n pohjaa.

### 4. KÄYTTÖOHJEET

#### 4.1 YLEISTÄ

SBI säilyttää sille kuuluvat ominaisuudet, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein sen koko käyttöikä (keskimäärin 6 kuukautta) vallitsevien ympäristöolosuhteiden ja käytön mukaan. Tuotetta voidaan käyttää suoraan tai asianmukaisten pohjallisten kanssa kuten edellä erikseen kuvattu. On tärkeää, ettei muuteta rakennetta ja ennakkoituja tukipisteitä, jotta tuotteen toimivuus ei heikkene. Ei tunnettuja kontraindikaatiota.

#### 4.2 TUOTTEEN PUHDISTUS JA SÄILYTYS

- Jäykkä tuki (1) ja napit (7): astianpesukoneessa (maksimilämpötila 45°) tai käsin miedolla saippualla ja huuhtelu kylmällä vedellä;
- Pehmeät vuoraukset (2-2a), pohja (5-5a), säärivahvike (3), käytä kylmää vettä ja puhdista miedolla saippualla, huuhtelee kerran toimenpiteen lopuksi;
- Hihnat (4), soljet (8), sukka (12) pesukoneessa kylmällä vedellä;
- vältä kaikkia voimakkaita nesteitä kuten alkoholi, valkaisuaine, ammoniakki, liuottimet, peroksidit ja optiset kirkasteet;
- älä käytä tahrojen poistoon hankaavia tuotteita kuten harjat, teräsvilla, hiomapaperi tai terät. Salvatelli srl ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat materiaalia vaurioittavista hankaavista tuotteista tai altistumisesta suorille lämmönlähteille;
- kuivaa käsin pehmeällä liinalla tai ilmassa kaukana lämmönlähteistä tai suorasta auringonvalosta;
- älä käytä kuivausrumpua tai muuta kuivauslaitetta.



- Pääyksikkö AFO (Motus, Frame) tai AFO open (W-Heel) polypropeenilla
- Päälinen pehmeää eteenivinyylia-setaattia (EVA)
- Pehmeä suojele eteenivinyylia-setaattia (EVA)
- Puolijäykkä säärivahvike TPU:ta
- Tarrahihnat
- Täydellisesti rullaava keinupohja (Motus/W-hell)

- Stabiili keinupohja (Frame)
- Pohjan etukiinnityspisteet
- Irrotuksen estävä NRS-järjestelmä (**SBi Motus**)
- SBI-napit
- SBI-soljet
- SBI-avain
- SBi 3x3 kevennyspohjallissarja**
- SBi pohjallinen amputoidulle jalalle**
- SBi saumaton sukka**

### 5. TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

SBI-tuotteissa käytetyt materiaalit ovat tyypiltään osittain ympäristöystävällisiä ja sen vuoksi on huomioitava tiettyjä sääntöjä tuotteen hävittämisen yhteydessä. Älä heitä tuotetta ympäristöön.

Tarkasta inerttien aineiden ja muovituotteiden hävittämistä koskevat paikalliset määräykset. Polypropeenilla (PP) ja ABS:ää olevat osat ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä ja ne on hävitettävä yhdessä muovin kanssa. Pakkaus voidaan hävittää muovijätteenä (nailonpusit) ja paperijätteenä (paperiosat).

### 6. TUOTTEEN TUNNISTETIEDOT

TEKNISET TIEDOT			
Valmistusvuosi ja paikka	2017 Valmistettu Italiassa		
Valmistaja ja myyntiluvan haltija	Salvatelli srl - Via Breda 19/21 Civitanova Marche (Mc) Italia		
MITAT			
MOTUS/W-HEEL	S	260x120x335	M 285x128x350
	L	300x135x345	XL 320x143x360
	XXL	340x158x375	
FRAME	S	260x120x330	M 285x128x340
	L	300x135x350	XL 320x143x360
	XXL	340x158x375	
Nettopaino MOTUS	S	0,77	M 0,87
	XL	1,15	XXL 1,26
Nettopaino FRAME	S	0,76	M 0,86
	XL	1,16	XXL 1,25
Nettopaino W- Heel	S	0,74	M 0,85
	XL	1,13	XXL 1,27
Tuotteen luokitus	luokka I Direktiivi 93/42 ETY		
SOPII MOLEMPIIN JALKOIHIN	KOOT: S (small) M (medium), L (large) XL (extra large) XXL (extra extra large)		
	EUR: S 34-36, M 37-39, L 40-42, XL 43-45, XXL 46-48		
Valmistuserä	Osoitetaan jokaisen tuotteen etiketissä viivakoodin alla		
SBin valmistusmateriaalit	Puolijäykkä säärisuojus ja soljet (TPU), päälinen, pehmeä säärisuojus ja pohjalliset (EVA), Afo- ja Afo Open (PP), napit ja SBI-avain (nailon), pohja (EVA+nailon), tarra (polyamidi+polyesteri), suojasukka (90 % puuvillaa, 7 % polyamidia, 3 % elastaania)		
Pakkaus	Paino 106 g Materiaali: Pahvi + nailon		
SBI-tuotteissa ei ole lateksia			

### 7. TAKUU

Annettava takuu koskee ainoastaan materiaalivikoja ja valmistusvikoja ja se antaa tuotteille lain mukaisen takuusoijan. Salvatelli srl vaihtaa tuotteen, sen osan tai lisävarusteet kuuden (6) kuukauden kuluessa ostopäivästä, mikäli niissä on valmistusvikoja. Annettava takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

- kuljetuksen aiheuttamat vahingot, joita ostaja ei ilmoita kuljettajalle toimituksen yhteydessä;
- korjaukset, jotka on suorittanut muu kuin valmistaja;
- tuotteen normaali kuluminen;
- vahingot, jotka ostaja on aiheuttanut tuotteen virheellisellä ja/tai sopimattomalla käytöllä, virheellisellä huollolla tai tuotteen säilytystä koskevalla huolimattomuudella.


#### 7.1 PALAUTUSJÄRJESTELMÄ

Puutteelliseksi katsottava tuote voidaan palauttaa jälleenmyyjän tai asiakkaan toimesta ainoastaan Salvatelli s.r.l. -yhtiön ennakkoan antamalla luvalla. Tuote on toimitettava ehdottomasti alkuperäisessä pakkauksessa yhdessä ostokuitin kanssa kuljetusmaksut maksettuna. Mikäli yhtiö toteaa olevansa vastuussa, tuote palautetaan yhtiön toimesta jälleenmyyjälle tai asiakkaalle.

### 8. SBI-TUOTTEEN VALMISTELU

#### 8.1 SBI-TUOTTEEN KÄYTTÖ

- Avaa tarrat ja irrota etukieleke (kuva A);
- pue tukijalkineeseen kuuluva suojasukka (12 **SBi Protective Sock**);
- istuma-asennossa työnnä jalka tukijalkineeseen asettaen kantapää SBI:n takaosaan (kuva A). Aseta kieleke (säärisuojus 2a+3) jalkaterän ja jalan yläpuolelle ollen tarkka, että kirjoitus Optima asettuu piirroksen mukaisesti varpaita vastaavasti (kuva B). Sulje tarrat oikeassa järjestyksessä aloittaen kohdasta I ja päätyen kohtaan III (kuva C). Ole tarkka, että työnnettä kielekkeet la-lla-llla asianmukaisiin aukkoihin ja kielekkeen IV säärivahvikkeen 3 alle (kuva C2 ja C3).

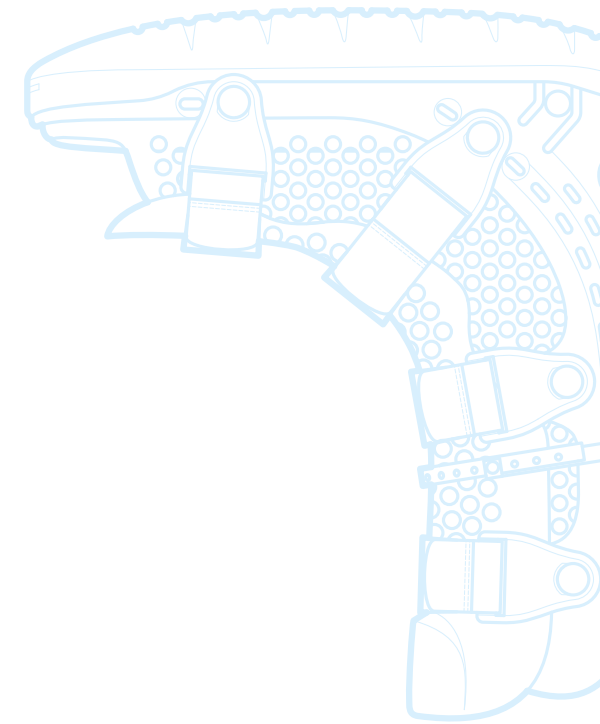

**SBi** SALVATELLI BROTHERS INNOVATION

**KÄYTTÖOPAS**

**OPTIMA**  
molliter



## 8.2 IRROTUKSEN ESTÄVÄN JÄRJESTELMÄN (NRS) KÄYTTÖ

- Irrotuksen estävän SBI-tukijalkineen käyttötarpeen voi määrittää ainoastaan tukilaitteen määrännyt erikoislääkäri potilaan kliinisen tilan arvioinnin pohjalta;
- irrotuksen estävää järjestelmää (NRS) saa käyttää ainoastaan erikoistunut lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö;
- jokainen **SBi Motus** -tukijalkine sisältää pakkauksessa yhden kertakäyttöisen NRS-järjestelmän (6);
- työssä ensimmäinen remmi asianmukaiseen tukijalkineen sivuaukkoon, joka osoitetaan tunnuksella NRS (kuva D). Työssä toinen remmi tukijalkineen vastakaiseen aukkoon, joka osoitetaan tunnuksella NRS;
- sulje ensimmäinen nappi (kuva E) ja tämän jälkeen sulje toinen nappi (kuva F);
- kirjoita pysyvämuisteisella huopakynällä kiinnityspäivä asianmukaiseen tilaan NRS-remmissä (kuva G);
- NRS-järjestelmä on poistettava ja vaihdettava viimeistään 7 päivän kuluessa.



## 8.3 SBI-POHJAN ASENNUS JA VAIHTO

**VAROITUS:** SBI-pohjat voidaan asentaa, purkaa ja vaihtaa pääyksikköön helposti ja nopeasti. On kuitenkin tärkeää, ettei aliarvioida vaaroja, jotka voivat aiheutua järjestelmän virheellisestä käytöstä. Ennen SBI-pohjan irrottamista, lue huolellisesti seuraavat ohjeet.

**VAROITUS:** Älä koskaan kävele ilman SBI-pohjaa. Ilman SBI-pohjaa kävely on erittäin vaarallista ja siitä voi aiheutua kaatumisia tai vaaratilanteita.

**POHJAN IRROTTAMINEN:** Vapauta SSI-turvajärjestelmä nostamalla siivekkeitä ylöspäin (kuva H). Paina samanaikaisesti samalla kädellä kahta vapautuspainiketta 1a ja 1b (kuva H) ja vedä sitten toisella kädellä pohjaa alas (kuva H2). Tässä vaiheessa etulukituspisteet (5b/5c) vapautuvat helposti.




**POHJAN ASENTAMINEN:** Aseta pohja tasaiselle pinnalle, työnnä AFO- tai AFO OPEN -päärungon kärjen liittimet etulukituspisteisiin (1c/1d) pohjan asiaankuuluviissa aukoissa (kuva L). Tässä vaiheessa paina SBI:tä pohjaa kohden, kunnes kuulet kaksi naksahdusta (kuva M), sulje SSI-turvasiivekkeet siirtämällä ne ala-asentoon (kuva M). Varmista sitten, että pohja on kiinnitetty kunnolla SBI:hin. Liukastumisvaara kosteilla pinnoilla!



## 9. OHJEET APUVÄLINETEKNIKOILLE TAI TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖLLE


### 9.1 SBI-NAPPIEN JA -SOLKIEKSIEN PURKAMINEN JA ASENTAMINEN

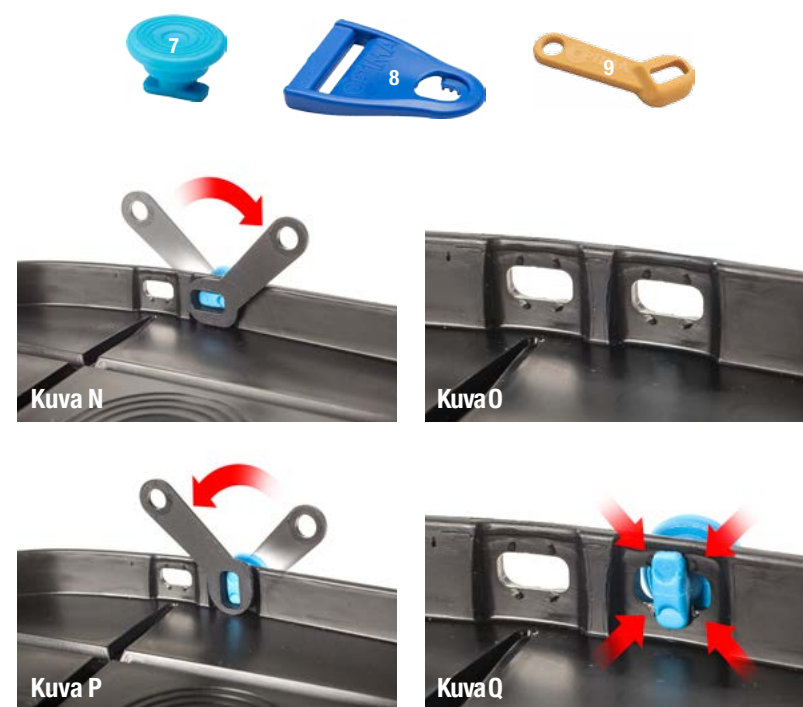

**VAROITUS:** SBI:n napit (7) ja soljet (8) voidaan vapauttaa pääyksiköstä (1) ja asettaa asianmukaisille paikoilleen (kuva S) helposti ja nopeasti. On kuitenkin tärkeää, ettei aliarvioida vaaroja, jotka voivat aiheutua virheellisestä asennuksesta ja purkamisesta. SBI:n nappien ja solkien asennus ja purku on tehtävä, jonka saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilökunta kuten apuvälineteknikko tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Ennen nappien ja solkien vapauttamista, lue huolellisesti seuraavat ohjeet.

**VAROITUS:** Jokaisen SBI-pakkauksen mukana toimitetaan "SBI-avain" (9), jota tarvitaan asennettaessa ja irrotettaessa SBI:n nappeja.

### SBI-NAPPIEN PURKAMINEN JA ASENTAMINEN

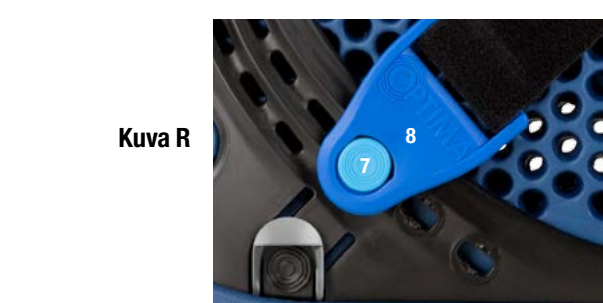

Jokaiseen SBI-toimitukseen kuuluu 8 SBI-nappia sekä 3 varaosannappia, jotka löytyvät pakkauksesta ostohetkellä.

**SBI-NAPPIEN PURKAMINEN:** Poista koko SBI:n yläosa ja pohja. Työnnä "SBI-avain" sisäpuolelta ja kierrä myötäpäivään, kunnes napin sisäosa tulee ulos omalta paikaltaan (kuvat N ja O).

**SBI-NAPPIEN ASENTAMINEN:** Poista koko SBI:n yläosa ja pohja. Aseta nappi asianmukaiseen aukkoon ulkopuolelta (kuva P) ja työnnä "SBI-avain" sisäpuolelta ja kierrä vastapäivään, kunnes SBI-nappi lukkiutuu sisäpuolelta asianmukaisiin rajoittimiin (kuva Q).

**VAROITUS:** SBI-napin on oltava asianmukaisesti lukittu sisäpuolelta sen rajoittimiin (kuva U), muussa tapauksessa se voi irrota aiheuttaen vaaraa käyttäjälle.

### SBI-SOLKIEKSIEN PURKAMINEN JA ASENTAMINEN:

Jokaisen SBI:n mukana toimitetaan 8 SBI-solkea (8). Toimenpiteen helpottamiseksi suositellaan poistamaan SBI:n pohja.

**SBI-SOLJEN PURKAMINEN:** Paina solkea (8) ulospäin ja irrota se napista (7).

**SBI-SOLJEN ASENTAMINEN:** Työnnä soljen asianmukainen aukko (8) nappiin (7) ja paina.

### 9.2 SÄÄRIVAHVIKKEEN PURKU SÄÄRISUOJUKSESTA JA TAKAISIN ASENNUS

"Puolijäykkä SBI-säärivahvike" (3) voidaan purkaa helposti "SBI-säärisuojuksesta" (2a) käyttämällä tarrajärjestelmää. Samalla tavalla se voidaan asentaa takaisin helposti. Vedä hitaasti puolijäykkää säärivahviketta sen purkamiseksi. Asenna se takaisin yksinkertaisesti asettamalla se paikalleen ja ollen tarkkana, että kirjoitus "Optima" on sijoitettu varpaita kohden (kuva S).



### 9.3 TUOTTEIDEN YKSILÖLLINEN SOVITTAMINEN

Modulaarinen järjestelmä **SBI KIT 3\*3** on suunniteltu, jotta plantaarista painetta voidaan jakaa eri tavalla ja hallita siten paineesta aiheutuvia jalkaterän etu- ja keskiosan sekä kantapäähän haavaumia/vammoja.

**VAROITUS:** **SBI KIT 3\*3**:n yksilöllisen sovittamisen saa suorittaa ainoastaan lääkärit, sairaanhoitajat, ortopedian teknikot tai terveydenhuollon ammattihenkilöt.

**VAROITUS:** **SBI KIT 3\*3**:a saa käyttää ainoastaan seuraavien tuotteiden sisällä: **SBi Motus** (1 sarja kuuluu vakiovarusteisiin), **SBi W-Heel** (yksi sarja vakiovaruste), **SBi Frame** (lisävaruste). Älä koskaan käytä **SBI KIT 3\*3**:a tavallisissa kengissä tai muissa tukijalkineissa. Salvatelli srl ei vastaa **SBI KIT 3\*3**:n käytöstä muissa kuin SBI-laitteissa.

**VAROITUS:** **SBI KIT 3\*3**:a on käytettävä aina yhtenä kokonaisuutena kaikkien sen osien kanssa. Nämä ovat kiinteästi toisiinsa liittyneitä SBI-tukijalkineen sisällä.

1. **SBI KIT 3\*3** (10) sisältää 9 palapeli-järjestelmällä toisiinsa liittyvää osaa, joista muodostuu 3 erillistä pohjalliskerrosta;
2. kolmessa pohjalliskerroksessa on 3 erilaista tiheyttä (punainen = pehmeä, beige = medium, sininen = jäykkä) ja ne voidaan yhdistää pystysuuntaisesti ja vaakasuuntaisesti. Plantaarinen paine voidaan jakaa uudelleen yksinkertaisesti yhdistämällä osat keskenään. Toimenpide voidaan tehdä yksinkertaisissa vaiheissa;
3. jotta vähennetään painetta haavautuneella/vammautuneella alueella, **SBI KIT 3\*3** voidaan mukauttaa tekemällä merkintöjä ja leikkaamalla pois osa pohjallisesta:

**A. POTILAS, JONKA PAINO ON ALLE 90 KG** (Merkitse haavautunut/vammautunut kohta beige värisen pohjalliseen).

1. peitä plantaarinen vamma/haavauma läpinäkyvällä steriilikalvolla ja, huulipunalla tai sopivalla pois pyyhittävässä olevalla huopakynällä, merkitse vamman/haavautuman ääriiivat suoraan läpinäkyvään kalvoon (kuva T.1).
2. aseta koko KIT3\*3-pohjallissarja SBI-tukijalkineeseen ja varmista, että BEIGEN värinen pohjallinen koskettaa jalkaa (BEIGE-PUNAINEN-SININEN);
3. työnnä potilaan jalka SBI-tukijalkineeseen, aseta säärikipiele paikalleen ja sulje 4 tarraihnaa. Avusta potilasta kävelyssä (10 askelta). Tällä tavalla pohjallisen pinnalle merkitään vamman sijaintikohta.
4. avaa sitten tukijalkine ja poista koko **SBI KIT 3\*3**;
5. merkitse kynällä jäljen ääriiivat ylittäen ne noin 6-8 mm (kuva T.2a);
6. leikkausveistä (10 mm:n terä) apuna käyttäen, leikkaa merkinnän ääriilaidat ja pidä terää noin 45°:n kulmassa (kuva T.3);

7. kokoa osat halutun paineen uudelleenjakautumisen mukaisesti (katso kuviota A) ja työnnä koko **SBI KIT 3\*3**-pohjallinen SBI-tukijalkineeseen;
  8. varmista, että reiällä varustettu pohjallinen on keskimmaisessä segmentissä;
- VAROITUS:** KEVYNNYSREIÄLLÄ VARUSTETUT ALUEET EIVÄT SAA JOUTUA KOSKAAN KOSKETUKSIIN PLANTAARISEN HAAVAUMAN/VAMMAN KANSSA.
9. jotta vältetään infektiot, suojaa aina haavauma/vamma asianmukaisella haavasidoksella ennen **SBI KIT 3\*3**:n käyttämistä;
  10. kun olet pukeutunut SBI-suojasukkan (12), joka toimitetaan jokaisen SBI:n mukana, SBI-tukijalkine voidaan työntää potilaan jalkaan.

**VAROITUS:** ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ SBI-TUKIJALKINETTA ILMAN SUOJASUKKAA (**SBi Protective Sock** (12)).

**B. POTILAS, JONKA PAINO ON YLI 90 KG** (Merkitse haavautunut/vammautunut kohta SINISEEN pohjalliseen).

1. Peitä plantaarinen vamma/haavauma läpinäkyvällä steriilikalvolla ja, huulipunalla tai sopivalla pois pyyhittävässä olevalla huopakynällä, merkitse vamman/haavautuman ääriiivat suoraan läpinäkyvään kalvoon (kuva T.1).
2. aseta koko KIT3\*3-pohjallissarja SBI-tukijalkineeseen ja varmista, että SININEN pohjallinen koskettaa jalkaa (SININE-BEIGE-PUNAINEN);
3. työnnä potilaan jalka SBI-tukijalkineeseen, aseta säärikipiele paikalleen ja sulje 4 tarraihnaa. Avusta potilasta kävelyssä (10 askelta). Tällä tavalla pohjallisen pinnalle merkitään vamman sijaintikohta.
4. avaa sitten tukijalkine ja poista koko **SBI KIT 3\*3**;
5. merkitse kynällä jäljen ääriiivat ylittäen ne noin 6-8 mm (kuva T.2b);
6. leikkausveistä (10 mm:n terä) apuna käyttäen, leikkaa merkinnän ääriilaidat

7. leikkaa kevennysalue II beige värisestä pohjallisesta samalla tavalla;
  8. kokoa osat halutun paineen uudelleenjakautumisen mukaisesti (katso kuviota B) ja työnnä koko **SBI KIT 3\*3**-pohjallinen SBI-tukijalkineeseen;
  9. varmista, että reiällä varustettu pohjallinen on keskimmaisessä segmentissä;
- VAROITUS:** KEVYNNYSREIÄLLÄ VARUSTETUT ALUEET EIVÄT SAA JOUTUA KOSKAAN KOSKETUKSIIN PLANTAARISEN HAAVAUMAN/VAMMAN KANSSA.
10. jotta vältetään infektiot, suojaa aina haavauma/vamma asianmukaisella haavasidoksella ennen **SBI KIT 3\*3**:n käyttämistä;
  11. kun olet pukeutunut SBI-suojasukkan (12), joka toimitetaan jokaisen SBI:n mukana, SBI-tukijalkine voidaan työntää potilaan jalkaan.


**VAROITUS:** ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ SBI-TUKIJALKINETTA ILMAN SUOJASUKKAA (**SBi Protective Sock** (12)).

**VAROITUS:** **SBI KIT 3\*3** ON VAIHDETTAVA KOKONAAN 21 päivän kuluttua erikoislääkärin ohjeen mukaisesti (mikäli haavauma/vamma ei ole vielä parantunut).

Jos haluat lisätietoja, pyydä käyttötapa esittelevä video seuraavasta sähköpostiosoitteesta: info@molliter.net



**Kaavio A** soveltaminen potilaalle, jonka paino on alle 90 kg

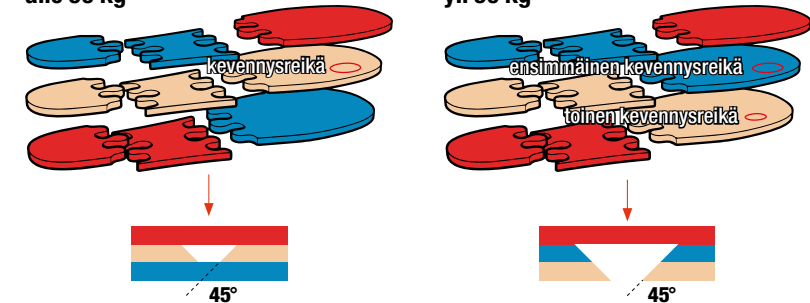

### 9.4 AMPUTOIDUN JALAN PLTM-POHJALLISEN SOVITTAMINEN

**VAROITUS:** **SBi PLTM** -pohjallisen käytön voi määrätä vain erikoislääkäri ja sen voi sovittaa ainoastaan lääkärit, sairaanhoitajat, apuvälineteknikot tai terveydenhuollon ammattihenkilöt.

**VAROITUS:** **SBi PLTM**:ää saa käyttää ainoastaan seuraavien tuotteiden sisällä: **SBi Motus** (lisävaruste), **SBi W-Heel** (lisävaruste), **SBi Frame** (lisävaruste). Älä koskaan käytä **SBi PLTM**:ää tavallisissa kengissä tai muissa tukijalkineissa. Salvatelli srl ei vastaa **SBi PLTM**:n käytöstä muissa kuin SBI-laitteissa.

**SBi PLTM** on suunniteltu leikkauksen jälkeiseen käyttöön, kun on amputoitu varpaat tai suoritettu metatarsaaliamputaatio.

1. Poista teippi mustasta tarralemmistä ja kiinnitä se pohjallisen sisäpinnalle.
2. kiinnitä tarrapuolelta oranssi materiaali tarralemmiin;
3. aseta vähemmän amputoitu jalka pohjalliselle varoon, että jalan ja oranssin materiaalin välillä on vähintään 1,5 mm:n rako (kuva U);
4. suojaa jalka ja sääri aina asianmukaisilla sidoksilla. Pue sidosten päälle SBI-suojasukka, joka toimitetaan jokaisen SBI-tukijalkineen mukana.

