

ToeUP[™] - riippunilkkaortoosi

Uusi riippunilkkaortoosi Allardilta!

ToeUP on tekstiilinen riippunilkkaortoosi henkilöille, joilla on lievä riippunilikka. Ortoosissa on tekstiilinen nilkkaosa on miellyttävän tuntuinen nilkkaa vasten. Joustavat koukkunauhat tarjoavat hyvän tuennan. Ortoosi avustamaan jalan nostamista kävelyn heilahdusvaiheessa.

- Löysän nilkan dorsaalifleksion tukemiseksi ja jalan nostamiseksi kävelyn heilahdusvaiheessa.
- Jalan vetoa ylöspäin voidaan säätää muuttamalla koukun sekä tarrapintaisten tekstiiliosaan kiinnitettävien levyjen paikkaa.
- Pehmeä ja joustava, ulko- ja sisäkäyttöön
- D-rengas pitää joustavat kuminauhat yhdessä



Tuentaa ja mukavuutta lievään riippunilkkiaan

ToeUP ortoosissa on tekstiilinen nilkkamansetti, joka kiinnitetään malleolien yläpuolelle. Nilkkamansetti kiinnitetään koukulla ja joustavilla kuminauhoilla kengän läpän ja nauhojen väliin. Tämä tukee nilkan nostoa kävelyn aikana. Jalan vetoa ylöspäin voidaan säätää muuttamalla koukkulevyn sekä tarrapintaisten nilkkamansettiin kiinnitettävien kuminauhojen paikkaa.

Mukana tulevalla D-lenkillä joustavat kuminauhat voidaan liittää yhteen paremman istuvuuden takaamiseksi.

ToeUP tarjoaa myös jalkaterämansetin sisäkäyttöön. Jalkaterämansetti soveltuu myös muun muassa sandaalien kanssa.



D-renkaan avulla joustavat kuminauhat voidaan kiinnittää yhteen.



Jalkaterämansetti mahdollistaa ortoosin käytön sisätiloissa ja/ tai muun muassa sandaalien kanssa.



Tuotenro	Malli	Koko	Vas/Oik
28500	ToeUp - pakkaus sisältää 28502 - 28506	XS-L	Bilateraali
28501	Jalkaterämansetti (sisätiloihin sopiva)	S-L	Vas/Oik
28502	Lisäkuminauhat	XS-S, M-L	-
28503	Lisäkoukut	Yksi koko, pari	-
28504	Lisä D-rengas	Yksi koko	-
28505	Lisäkoukkulevy	Yksi koko	-
28506	Erillinen nilkkamansetti	XS-L	Bilateraali



Skannaa tai klikkaa lisätietoja!

CAMP[®]
SCANDINAVIA

Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Finland
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no