

S.O.T PEUKALO-ORTOOSI

Lepo-ortoosi, joka ohjaa peukalon ihanteelliseen lepoasentoon.



UUSI AINUTLAATUINEN
ORTOOSIRATKAISU!



S.O.T PEUKALO-ORTOOSI

on täysin uudenlainen anatomisesti muotoiltu tuki peukalolle ja kämmenelle.


Ortoosi on muotoiltu rajoittamaan liikettä peukalon CMC- ja MCP-nivelissä, antamaan tukea kämmenkaarille ja tukemaan peukalon nivelet ja lihakset mukavaan lepoasentoon.

Käyttöalueet:

Nivelrikko* ja nivelreuma, adduktiokontraktuura peukalossa ja yllirasitusvammat.



RAJOITA LIIKETTÄ

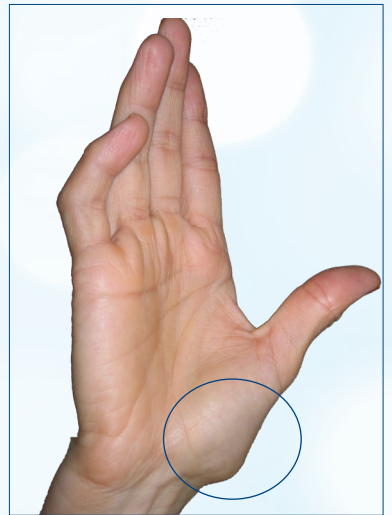

PEUKALON ADDUKTIOASENTO



- Ortoosissa on säädettävä alumiinituki, joka voidaan helposti muotoilla yksilöllisesti istuvaksi.
- Ortoosia voidaan muotoilla jälkikäteen kontraktuuran muuttuessa.
- Ortoosi voidaan pestä koneessa päällisen kanssa 40 asteessa.
- Ortoosi on erinomainen vaihtoehto erikoisvalmisteisille lepo-ortooseille muotoiltavuutensa ansiosta.

* OA-CMC alue I-4¹ asteilla. 4 luokan osteoartroosiin liittyy myös Os Scaphoideum. Tällöin peukalotuki tulee yhdistää ranneortoosin kanssa.
¹Eaton and Littler Classification of Basilar Thumb Arthritis.

YLIMÄÄRÄINEN TUKE

Kun tarvitaan lisäksi tukea ranteen alueelle, voidaan SOT peukalo-ortoosia käyttää yhdessä ranneortoosin kanssa, esim. 46029 Vission Ranneortoosi tai 35207 Selection Open wrist. Potilaille, joille kynnärvarren murtumasta seuranneen immobilisoinnin seurauksena syntyy adduktiokontraktuura, voidaan SOT peukalo-ortoosia käyttää öisin yhdistettynä rannetukeen. Rannekanavaoireyhtymä-potilaat hyötyvät rannetuen käytöstä öisin.. Ortoosi antaa tukea MCP-nivelille ja avaa kättä parempaan asentoon antaen tilaa medianus-hermolle Carpaalikanavassa. Tämä on myös suotuisaa nivelrikossa/nivelreumassa, jolloin on riski intrinsic-lihasten lyhentymiselle. Tällöin SOT peukalo-ortoosin nauhasetti otetaan pois ja tuote asetetaan ranneortoosin sisään kuten kuvassa.




Tässä S.O.T. Peukalo-ortoosi yhdistettynä Vission rannetuen kanssa. Joustava ja toimiva ortoosiratkaisu, kun tukea tarvitaan myös ranteen nivelille.





S.O.T PEUKALO-ORTOOSI

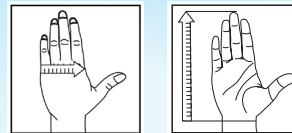

Tuotenro.	Tuote	Puoli	Koko	MCP Leveys**	Pituus* * (ranteesta sormenkärkeen)
28720 1011	S.O.T.Peukalo-ortoosi*	Vasen	Small	≤7,5 cm	≤ 18,5 cm
28720 1012	S.O.T.Peukalo-ortoosi*	Vasen	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
28720 1013	S.O.T.Peukalo-ortoosi*	Vasen	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm
28720 2011	S.O.T.Peukalo-ortoosi*	Oikea	Small	≤7,5 cm	≤ 18,5 cm
28720 2012	S.O.T.Peukalo-ortoosi*	Oikea	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
28720 2013	S.O.T.Peukalo-ortoosi*	Oikea	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm
28721 1011	Lisäsuojus	Vasen	Small		
28721 1012	Lisäsuojus	Vasen	Medium		
28721 1013	Lisäsuojus	Vasen	Large		
28721 2011	Lisäsuojus	Oikea	Small		
28721 2012	Lisäsuojus	Oikea	Medium		
28721 2013	Lisäsuojus	Oikea	Large		

* koko ortoosi suojuksella.

** Käden ja sormien välinen suhde voi vaihdella.

Tämän vuoksi kokointervalli on vain ohjeellinen.

Lue lisää S.O.T Peukalo-ortoosista kotisivuiltamme. Sieltä löytyvät sekä käyttöohjeet sekä Ohjeita ja Vinkkejä niin terapeutille kuin käyttäjälle ladattavaksi.

[https://www.camp.fi/peukalotuet/SOT Peukalo-ortoosi.](https://www.camp.fi/peukalotuet/SOT%20Peukalo-ortoosi)