

CAMP®

**Semi-rigidi
Hyperestensio-ortoosi**





Toiminnallinen polviortoosi polven ylijännitykseen

Anatomisesti muotoiltu patella-aukko silikoni-pehmusteella.

Tasku, joka suojaa ja pitää nivelen paikallaan.



Takaristikon nauhat voidaan säätää yhdellä kädellä.

Leveä nauha estää lastoja liukumasta taaksepäin kun hyperekstensionauhaa kiristetään.



Silikoni on asetettu strategisesti liukumisen estämiseksi

Säädettävä nivel:
Flexio: 45°, 60°, 75°, 90°
Ekstensio: 10°, 20°, 30°, 40°

Mukavuuden lisäämiseksi on ortoosi muotoiltu jalan linjojen mukaan.

Muotoiltu vahvistus, joka stabilisoi aukon ja keventää AFO:n painetta.

Mikä tekee CROSSista käyttäystävällisen?



Ohut, kevyt ja hengittävä materiaali, joka on miellyttävän tuntuinen.

- Tarkkaan suunnitellun yläosan vahvistuksen ansiosta ortoosi pysyy aina avoimena ja on siten helppo vetää jalkaterän yli ja säärtä pitkin ylös myös silloin kun käden toiminta on rajoittunut.
- Reilu yläreunan vetotasku on apuna vedettäessä ortoosia säärtä pitkin ylös ja asetettaessa patella-aukkoa oikeaan kohtaan polvessa.



Hyvin pehmeä sisäpuoli vähäisellä kitkalla ja ilman näkyviä ja hankaavia saumoja.

- Luo ”suojakerroksen” ortoosin ja ihon väliin.
- Vähentää ihoärsytystä
- Auttaa ortoosia liukumaan jalkaterän yli säärtä pitkin ylös paikalleen.



Pue ortoosi yhdellä kädellä

Ainutlaatuinen mukana tuleva veto-koukku tekee yksinkertaisemmaksi:

- Pukea ortoosi istuvassa asennossa
- Pukea ortoosi omin käsin jopa rajoittuneella käden toiminnalla

Kuinka veto-koukku käytetään?

- Veto-koukku asennetaan harmaan merkin alle reisosan takana
- Kaikkien nauhojen ollessa auki vedetään ortoosi jalan yli ortoosin takaosan ollessa käännettynä eteen.
- Kun ortoosi on vedetty jalan yli, käännetään se oikein päin. Sileä vuori helpottaa ortoosin vetämistä jalkaan. Ortoosi vedetään ylös, kunnes patella-aukko on oikein asetettu polven yli.



Hyperekstensio-ortoosi

VETOKOUKKU



SIVUSTA



TAKAA



CROSS™ on tarkoitettu tukemaan polviniveltä, jossa on lievä tai keskivaikea yliojennusongelma neuromuskulaaristen sairauksien tai muiden vammojen seurauksena. Ortoosia voidaan käyttää yhdessä Allard AFOjen kanssa kun yliojennus polvinivelessä esiintyy yhdessä riippunilkan kanssa.

| Tuotenro. | Tuote | Koko | Ympärysmitta 15 cm patellan keskikohdan alapuolelta | Polven-ympärysmitta patellan keski-kohdasta | Ympärysmitta 15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta. |
|------------|--------------|-----------|---|---|--|
| 28715 0011 | Polviortoosi | Small | 32-37 cm | 32-37 cm | 39-44 cm |
| 28715 0012 | Polviortoosi | Medium | 36-41 cm | 36-41 cm | 43-48 cm |
| 28715 0013 | Polviortoosi | Large | 40-45 cm | 40-45 cm | 47-52 cm |
| 28715 0014 | Polviortoosi | X-Large | 44-49 cm | 44-49 cm | 51-57 cm |
| 28716 0000 | Veto-koukku | Yksi koko | | | |